


PEQUENO MANUAL PASSO-A-PASSO

Sistema de extensores de barras

PENIMASTER[®] PRO

PEQUENO MANUAL PASSO-A-PASSO

Sistema de extensores de cintas

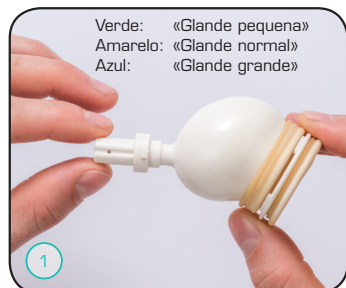

Rodar a válvula rotativa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e fechar.



Distribuir um par de gotas de líquido ProMaster pela glande.



Distribuir 3-4 gotas de líquido ProMaster pela parte interior do látex.



- Pressionar a pêra de borracha **quase** totalmente.
- **Manter premida** a pêra de borracha (a marcação no plástico indica o sentido para cima) e pou sar na válvula rotativa **fechada**.



- Girar a câmara da glande contra a pêra de borracha
- Pressionar a pêra de borracha **máximo**.
- Pressionar a glande **cuidadosamente** contra a câmara da glande.



Abrir **lentamente** a mão. É produzido um vácuo que suga a glande na câmara.

DICA: Caso a glande não seja completamente succionada:


- Rodar a pêra de borracha no sentido contrário e retirar
- voltar a pressionar
- pousar novamente e rodar
- voltar a desprender




Rodar a pêra de borracha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar. Manter a válvula rotativa fechada.



Ajustas as barras extensoras. O comprimento da barra corresponde ao comprimento do pênis dilatado + 1,5 cm.

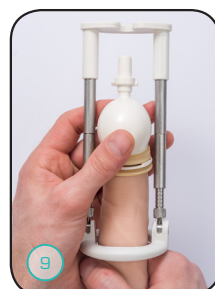

Deslizar a câmara da glande instalada nos tirantes.

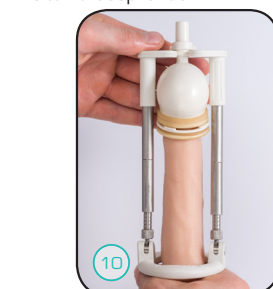

- Esticar o pênis
- pressionar a parte estreita da câmara da glande no suporte.
- Desprender.

Controlo da tração com mola de equilíbrio:

- Cerca de 230 gramas por marca.
- Baixa tração ao usar barras mais curtas.
- Aumentar a tração ao usar barras mais longas ou parafusos roscados.



Rodar a válvula rotativa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e fechar.

Verde: «Glande pequena»
Amarelo: «Glande normal»
Azul: «Glande grande»



Distribuir um par de gotas de líquido ProMaster pela glande.



Distribuir 3-4 gotas de líquido ProMaster pela parte interior do látex.



- Pressionar a pêra de borracha **quase** totalmente.
- **Manter premida** a pêra de borracha (a marcação no plástico indica o sentido para cima) e pou sar na válvula rotativa **fechada**.



- Girar a câmara da glande contra a pêra de borracha
- Pressionar a pêra de borracha **máximo**.
- Pressionar a glande **cuidadosamente** contra a câmara da glande.



Abrir **lentamente** a mão. É produzido um vácuo que suga a glande na câmara.

DICA:

Caso a glande não seja completamente succionada:


- Rodar a pêra de borracha no sentido contrário e retirar
- voltar a pressionar
- pousar novamente e rodar
- voltar a desprender



Rodar a pêra de borracha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar. Manter a válvula rotativa fechada.



- Ajustar a cinta à altura do corpo.
- Estender a cinta para reduzir a força de tração exercida no pênis
- Encurtar a cinta para aumentar a força de tração exercida no pênis.

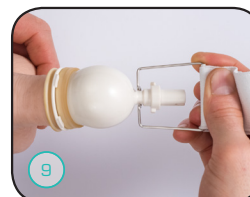

- Prender o acoplamento metálico na parte estreita da câmara da glande.
- Apertar na cinta para uma fixação segura.



- Passar o pênis, pela esquerda ou direita, em torno da anca.



- Passar a cinta pelas costas e coxa.
- Prender a cinta num anel ou diretamente na cinta.



- Dobrar o pênis para cima.
- Colocar a cinta sobre o ombro.



- Cruzar aunderschenkel cinta nas costas.
- Prender a cinta nas calças.



- Sente-se numa cadeira.
- Colocar a cinta à volta da perna.



Passar a extremidade solta da cinta em torno da parte da cinta que está ligada ao pênis.



Prender com o clipe a cinta no anel.